



Dispositif à vacciner Prima avec porte-bouteille

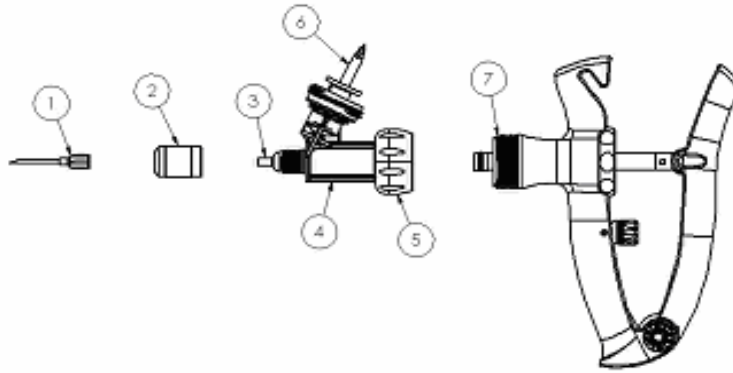

Pose de l'aiguille (1) : Ouvrir l'emballage stérile pour mettre à découvert le pavillon de l'aiguille, tout en laissant celle-ci à l'abri dans le protège-aiguille en plastique. Ne pas desserrer ni enlever l'écrou en métal (2 – référence 330840) du corps de pompe (4 – 0,5 ml, référence 332912 ; 2 ml, référence 206800 ; 5 ml, référence 206855). Insérer le pavillon dans l'écrou, serrer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis enlever le protège-aiguille.

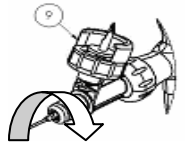

Pour enlever l'aiguille, dévisser le pavillon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis jeter l'aiguille en prenant des précautions.

Amorçage de la seringue : Régler la dose au maximum, puis pomper la seringue jusqu'à ce que le fluide commence à se déverser dans le corps de pompe.

Dosage : Aligner l'avant du piston à la dose désirée, imprimée sur le corps de pompe, en tournant le bouton de réglage de la dose dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens contraire. Tenir ensuite la seringue à la verticale, l'aiguille pointée vers le haut ; tapoter le corps de pompe pour centrer la bulle d'air, puis presser doucement pour chasser celle-ci.



Nettoyage : Laver l'applicateur à grande eau chaude et savonneuse, rincer et bien laisser sécher.

Lubrification : Enlever le corps de pompe, puis lubrifier le joint torique du piston avec de l'huile synthétique, catégorie alimentaire.

Utilisation de la seringue avec un collier de bouteille (9 – pour bouteille de 250 ml, référence 332080 ou 10 – pour bouteille de 100 ml, référence 218902) : Percer le tampon de caoutchouc (bonde) de la bouteille avec le scalpel fourni avec la seringue, glisser le collier sur le goulot, empaler la bouteille sur le perforateur (6), puis serrer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour enlever la bouteille, desserrer en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis sortir la bouteille du perforateur en la soulevant.

Pose du porte-bouteille Fast-Fit (8, raccord rapide – référence 336811) : Percer le tampon de caoutchouc (bonde) avec le scalpel fourni avec la seringue. Tenir le fond de la bouteille d'une main et le dispositif à vacciner de l'autre.



En regardant dans la fenêtre du raccord Fast-Fit, aligner le tampon sur le perforateur (6) et enfoncer fermement pour enclencher les clips latéraux. Ne pas tourner la bouteille.

Pour enlever la bouteille, abaisser les clips latéraux et sortir celle-ci.

Pour régler la tension du ressort de poignée, tourner le bouton de serrage (12) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression, en sens contraire pour la diminuer.



Des buses de drogeage (11) sont aussi disponibles pour votre dispositif à vacciner.

Buse de 4 po - référence 332882

Buse de 3 po - référence 333025

Autres pièces de rechange :

Joints toriques de piston : 0,5 ml – 335272 ; 2 ml – 203304 ; 5 ml - 203502

Prima Tech USA

PO Box 336 – Kenansville, NC 28349

É.-U. et Canada (888) 833-7099 • International et Local (910) 296-6116 • Téléc. (910) 296-0306 • courriel : info@primatchusa.com